Stand: 24.03.20	Mehrfach-Taster mit Audio-Buchse	Produktinformation
	BT-590-150-03	

Allgemeines

Der hier beschriebene **Mehrfachtaster mit Audiobuchse** wird im gleichen Gehäuse wie der Standardtaster Typ 74153B4 geliefert, jedoch wurde er um eine 3,5mm-Klinken-Buchse erweitert. Dadurch kann neben der <u>normalen Ruffunktion</u> und der Ansteuerung von <u>2</u> <u>Lichtsteuer-Relais</u> auch ein <u>Audio-Signal</u> zum Patienten übertragen werden. Die Auswahl der Tonquelle sowie die Lautstärkeregelung muss dabei extern erfolgen.



Standardmäßig ist die Steuerplatine Typ SP-591-189-00 erforderlich. Zur Pegelanpassung wird jedoch die Steuerplatine Typ SP-591-189-10 (mit integriertem Fest-Verstärker) empfohlen

Aufbau und Funktionsbeschreibung

Der Rufkreis ist in Ruhestromausführung mit Beruhigungs-LED aufgebaut (wie bei Typ 74153B4).

Die beiden Lichtsteuertasten sind bereits intern mit der Betriebspannung der Rufanlage verbunden und werden auf die Steuer-Platine Typ SP-591-189-00 (Zubehör) geschaltet, welche auf die Rückseite der Steck-Einheit 74189A gesteckt wird. Auf dieser Platine befinden sich die Anschlussklemmen für die Betriebsspannung der Rufanlage (2-polig), Ruftaste/Ruflampe (2-polig), das Audio-Signal (3-polig) und die potenzialfreien Lichtsteuer-Tasten-Ausgänge (3-polig).

Die seitlich herausgeführte 3,5mm-Kopfhörer-Buchse ist für normale Kopfhörer geeignet, das Audio-Signal wird dabei potenzialfrei auf die Kopfhörer-Buchse geleitet.

Geräteansicht



Stecker:

→ selbstlösend, A-codiert (8-pol.)

• Funktionen:

- → 1x Rufauslösung mit Beruhigungs-LED
- → 2x Lichtsteuer-Tasten (zusammen mit Steuer-Platine SP-591-189-00)

Zugentlastung:

→ innenliegend im Gehäuse

Buchse für Audio-Signal

→ 3,5mm-Buchse (3-pol.), isoliert

Hinweis:

Falls versehentlich der normale Mehrfachtaster Typ 74153B4 (ohne Audio-Buchse!) eingesteckt wird, so funktioniert zwar weiterhin der Rufkreis, jedoch sind die Lichtsteuertasten ohne Funktion!

Technische Angaben:

Anschlusskabel:	Kabel, 8-polig, grau, Länge 3m, mit selbstlösendem Stecker, A-codiert	
Gehäuse:	Kunststoff, ABS, verkehrsweiß (RAL 9016) mit isolierter Kopfhörer-Buchse	
	(Isolationsfestigkeit 1xMOPP)	
Rufkreis:	Ruhestrom mit Beruhigungs-LED,	
	passend für alle Clino-Systeme in Ruhestrom-Ausführung	
geeignete Steck-Einheit:	Typ 74189A (A-codiert, 8-pol. Anschluss)	
Bestell-Bezeichnung:	BT-590-150-03 Zubehör: SP-591-189-00 (Steuer-Platine für Lichtsteuerung)	
	SP-591-189-10 (Steuer-Platine für Lichtsteuerung mit integriertem Verstärker)	

