



Allgemeines

Das **Funkruf-Sitzkissen KM-099-541** dient zur Überwachung einer sitzenden Person. Sobald diese aufsteht, wird ein Funksignal ausgelöst, welches von einem Empfänger registriert wird oder als Ruf auf eine Rufanlage geschaltet werden. In der Regel handelt es sich dabei um gebrechliche Personen, welche z.B. normalerweise in einem Rollstuhl sitzen. Sobald diese z.B. aufgrund geistiger Beeinträchtigung aufstehen wollen, besteht eine akute Sturzgefahr, sodass eilendes Personal sofort Hilfestellung geben kann.



Person.
mobilen
kann.

herbei

Funktionsweise

Das Funkruf-Sitzkissen wird funktionsbereit ausgeliefert. Die Aufsteh-Überwachung wird gestartet, sobald sich eine Person darauf setzt (Gewicht >20kg). Das Funksignal wird ausgesendet, wenn das Kissen eine Entlastung (Gewicht <10kg) von mindestens 1s Dauer registriert. Dadurch ist gewährleistet, dass kurze Entlastungen infolge Bewegungen auf dem Stuhl nicht gleich zu einer Rufauslösung führen. Falls das Kissen nicht bereits zusammen mit einem passenden Funk-Empfänger (z.B. Typ FE-099-142) als "Set" ausgeliefert wurde, muss es bei dem zugehörigen Empfänger eingebucht werden (siehe Beschreibung Funk-Empfänger!).

Geräteansichten



Funkruf-Sitzkissen in rot



Sämtliche Einzelteile austauschbar!

- **Rufauslösung:**
→ Gewichtreduzierung <10kg
- **Alle Teile austauschbar:**
→ Funksender FS-099-541-00
→ Kontaktmatte KM-099-541-30
→ Schaumstoff-Set SS-099-541-00
→ Kissen-Bezug BZ-099-541-RT (Mikrofaser)
→ Kissen-Bezug BZ-099-541-RK (Kunstleder)
- **Keine Bedienung erforderlich**
→ wird funktionsbereit geliefert

Austausch der Batterie

Die Batterie sollte nach ca. 1 Jahr ausgetauscht werden (z.B. durch den örtl. Haustechniker).



- **Gehäuses öffnen**
→ 1 Schraube auf der Unterseite lösen, Gehäuse aufklappen!
- **Batterie austauschen**
→ Knopfzelle herauschieben, neue Zelle (Typ CR2032) einschieben (Plus-Pol nach oben)
- **Gehäuse verschließen**
→ Funktions-Test!

Technische Angaben:

Maße / Bezug:	(LxBxH) 400x400x40mm / Mikrofaser, waschbar bzw. Kunstleder desinfizierbar, rot (ähnlich weinrot)
Schaumstoff-Set:	Material PUR 40/70, als Ersatzteil verfügbar
Funksender:	869 MHz, Funkprotokoll: System 99 / Batterie
Batterie-Typ:	VARTA, Knopfzelle Typ CR2032, 3V, Li-Mn-Technologie
Auslöse-Schwelle:	Registrierung einer sitzenden Person: >20kg / Ruf-Auslösung: <10kg
Belastungsgrenze:	maximal bis 100kg dauerhaft belastbar (sitzende Person)
Bestell-Bezeichnungen:	KM-099-541-00 (Funkruf-Sitzkissen, rot, komplett) KM-099-541-RK (Funkruf-Sitzkissen, rot, komplett, Kunstleder, desinfizierbar) <u>Einzelteile:</u> KM-099-541-30 (Kontaktmatte)  SS-099-541-00 (Schaumstoff-Set)  BZ-099-541-RT (Sitzkissen-Bezug, Mikrofaser, rot)  BZ-099-541-RK (Sitzkissen-Bezug, Kunstleder, rot)  FS-099-541-00 (Funkrufsender mit Adapterplatine, komplett im Gehäuse)  BA-CR2-032-LM (Ersatz-Knopfzelle CR2032)  <u>Zubehör:</u> FE-099-142-01 (Funkruf-Empfänger, für Clino-Rufanlage, 7P-RS)  FE-099-143-01 (Funkruf-Empfänger, für Clino-Rufanl., 7P-RS, mit StopTaste)  FE-099-504-00 (mobiler Funkruf-Empfänger (Pager), mit USB-Ladekabel) 